

SFTS発生状況調査方法

調査対象：SFTSを疑う症状を呈したイヌまたはネコ、
SFTS陽性と判明したイヌ・ネコの同居動物（症状の有無は問わない）

採材検体：全血 500 μ L程度 または 血漿ないしは血清 250 μ L程度、
尿、口腔スワブ、直腸スワブ等

- ✓ ご提出いただく検体は採取できた体液でかまいませんが、基本はEDTA含有全血と尿をお願いいたします。
- ✓ 血液検体が十分量確保出来なかった場合には、他の体液の検体（尿、口腔スワブ、直腸スワブ等）も併せて採取してください。
- ✓ ヘパリン含有血漿は遺伝子検査に使用できませんが、抗体検査やウイルス分離検査には使用可能なため、ヘパリン含有血漿がある場合には、それをご提出いただきますようお願いいたします。

送付方法：ヤマト運輸のチルド宅急便（着払い）

- ✓ 平日の午前中を指定して送付してください。
- ✓ 送付する検体の種類・到着予定日を下記の問い合わせ先にご連絡ください。

問い合わせ先：富山県衛生研究所ウイルス部 佐賀由美子、谷英樹（ウイルス部長）
TEL:0766-56-8143（ウイルス部直通） FAX：0766-56-7326
Mail：yumiko.saga@pref.toyama.lg.jp

検体採取・送付セットの内容 （一式がA4茶封筒に入っています。）



① 輸送用B5クッション封筒

(オーバーパック)

② 輸送用パウチ (2次容器)

③ ヤマト運輸の輸送伝票

④ 書類一式

調査概要、調査方法(この文書)、
別添2(調査票)、別添3(説明書)、
別添4(同意書)

⑤ 輸送用ボックス (3次容器)

⑥ 綿棒 ×4本

⑦ 保冷剤 ×2個

保冷剤は冷凍庫に
入れておいてください。

⑧ 血液用ラベル ×5枚

⑨ 全血用チューブ ×2本 (EDTA入り)

⑩ 血清用チューブ ×2本


⑪ パラフィルム ×4枚

⑫ 体液用ラベル ×5枚

⑬ 体液用チューブ ×4本

⑭ パラフィルム ×4枚

※⑥以下は
⑤に入っ
ています。

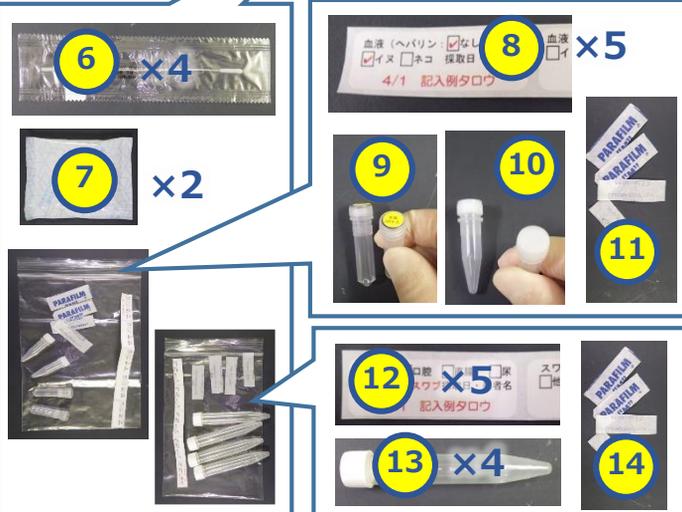

1. 飼い主の方への調査概要の説明と同意書の記入依頼

別添3：伴侶動物の飼い主の方用説明書

別添4 同意書

✓ 同意書の提出が後日となっても検査は実施いたしますので、**口頭での同意を得ている場合は「2」に進んでください。**

説明者欄は予め記載しておいてください。

別添2：調査票

2. 調査票の記入



臨床検査値等は、記載欄記入に代え、**検査結果用紙のコピーの提出**でもかまいません。

飼い主の方に、**ご本人および同居しているご家族に発熱等の体調異常を呈している方がいないか確認し、記載**してください。

3. 検体の採取（基本、全血と尿をお願いします。）

ラベルの記入・チューブへの貼付

- ✓ 鉛筆で記入していただくと、エタノール消毒でにじまないため、有難いです。
- ✓ ラベルは縦向きに貼付していただくと、検体の容量が分かりやすく、記入内容も読み取り易いため、有難いです。

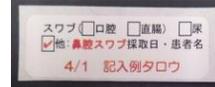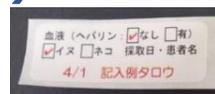

全血の採取



転倒混和

500μL程度
全血用チューブ
(EDTA入)に採取

血清または血漿の分注*

250μL程度
血清用チューブに分注


* 採取済みの検体がある場合
ご提出ください（追加採取
の必要はありません）。

尿の採取



1mL以上
体液用
チューブ
に採取

その他の体液の採取*

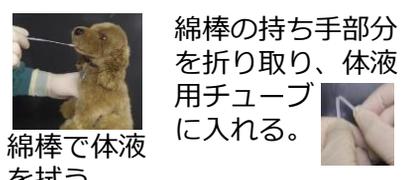

お手持ちの**滅菌生理食塩水**を
1~2mL程度添加

* 血液検体が十分量確保できなかった場合、
口腔、直腸スワブ等を採取してください。

- ✓ 採血用具および採尿用具は、お手持ちのものを使用してください。
- ✓ お手持ちの採血管やチューブに採取済みの検体がある場合は、そのまま提出いただいてもかまいません（検体を移し替える必要はありません）。

4. 検体の梱包・送付

(1) チューブの蓋にパラフィルムを巻く*



* パラフィルムは伸ばすと粘着テープのようになります。

(2) パウチに(1)を入れ、シール後、パウチをたたむ



(3) ボックスに保冷剤と(2)を入れる



(4) 輸送用封筒に調査票と同意書*、(3)を入れ、封をする



* 同意書は後日発送でもかまいません。

(5) 輸送伝票の「お届け希望日・時間」と「ご依頼主」を記入し、(4)に貼付



- * お届け希望日・時間は**平日の午前中**を指定してください。
- * ご依頼主の電話番号は緊急連絡先として**携帯電話番号**をご記入ください。

(6) 下記担当者に検体到着予定日と検体の種類を連絡し*、ヤマト運輸で(5)を発送（冷蔵・着払い）

- * 発送のご連絡は検体発送の後でもかまいません。
- 富山県衛生研究所ウイルス部 佐賀由美子
TEL：0766-56-8143 FAX：0766-56-7326
Mail：yumiko.saga@pref.toyama.lg.jp